



GEL ORAL  
**ODDENT<sup>®</sup> Forte**  
ÁCIDO HIALURÓNICO 0.8%

**Para su aplicación después de tratamientos en la mucosa bucal**

Para su aplicación en aftas y heridas profundas y durante la fase postoperatoria. Diseñado específicamente para garantizar un uso sencillo, rápido y eficaz.

El Ácido Hialurónico se encuentra de forma natural en la matriz extracelular de la mucosa bucal, donde interactúa con otros componentes del tejido conectivo para proporcionar la resistencia y elasticidad esenciales para una buena salud oral.

El Ácido Hialurónico posee diversas propiedades beneficiosas que contribuyen al éxito de un programa de tratamiento dental e higiene oral.

En concreto, el Ácido Hialurónico puede absorber una cantidad de agua equivalente a 50 veces su peso seco.

Esta característica permite al ácido hialurónico actuar como barrera contra la penetración de microorganismos y otras toxinas que pueden contribuir a la etiología de la enfermedad periodontal.

**ODDENT<sup>®</sup> Gel Oral Forte**

- Contiene como fuente de Ácido Hialurónico un derivado no animal, de alta pureza y calidad, en forma de sal de sodio de alto peso molecular.
- Tiene una acción local de duración prolongada.
- Se adhiere a la mucosa gingival debido a la naturaleza especial de la formulación del producto.
- Puede ser utilizado por todos los pacientes sin restricciones, incluidos niños, mujeres embarazadas, diabéticos y personas de edad avanzada.

**Indicaciones**

Estados en donde la mucosa gingival requiere una mayor concentración de Ácido Hialurónico

**Instrucciones de uso**

Inmediatamente después del tratamiento dental, aplicar una pequeña cantidad de gel directamente con la cánula en el área afectada o, después de lavarse bien las manos, aplicar el gel minuciosamente con el dedo y masajear suavemente la encía hasta que el área afectada esté completamente cubierta. Usar 1-2 veces al día, o cuando se necesite, a menos que su doctor indique lo contrario.

**Inocuo en caso de ingestión.**

**Uso odontológico**



**T500501**

Format: 100 x 170 mm

Pag 01

● Process Black C

## Composición

Ingrediente activo: Sodium Hyaluronate 0.80 %.

Otros ingredientes: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Alcohol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Glycerophosphocholine, Sodium phosphate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Sodium hydroxide. It may contain Citric Acid.

## Contraindicaciones

El uso de **ODDENT® Gel Oral Forte** está contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

## Advertencias y precauciones

No usar en caso de daño visible.

Conservar a una temperatura entre 5 °C - 40 °C, protegido de fuentes de calor directas.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

Si los síntomas persisten, consulte a un profesional sanitario.

## Presentación

**ODDENT® Gel Oral Forte** tubo de 8 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**Fecha de última revisión de este prospecto:** Septiembre 2019.

Fabricado por:

Sigmar Italia S.p.A. – Italia

Para:

Latin Farma, S.A. – Guatemala

**Bajo licencia de:**

 **RICERFARMA** S.R.L.  
[www.ricerfarma.com](http://www.ricerfarma.com)

T500501 | G27202-008-05/C/A



**T500501**

Format: 100 x 170 mm



Process Black C

Pag 02